

Gebruikershandleiding SÉCURIDRAP® SELFIA®



WAARSCHUWING:

Wij raden u aan om voor het eerste gebruik van het product alle instructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen te lezen. Als de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd of als een reparatie door een niet door Mulliez-Flory erkende persoon is uitgevoerd, kan dit aanleiding geven tot risico's waaronder het risico dat de patiënt komt te overlijden.

1-INDICATIES

Het SÉCURIDRAP® SELFIA® is bedoeld om **ter aanvulling van het gebruik van zijsponden** te voorkomen dat gedeoriënteerde personen en/of personen met onvoldoende spierkracht tijdens hun slaap uit hun bed kunnen.

N.B.:

SÉCURIDRAP® SELFIA® is een veiligheidsslaapzak die als immobilisatiemateriaal het statuut heeft van medisch materiaal van klasse I. Het gebruik ervan dient medisch te worden voorgeschreven op basis van de evaluatie van de verhouding voordelen/risico. Het gebruik wordt gemotiveerd in het dossier van de patiënt.

2-CONTRA-INDICATIES

Het gebruik van SÉCURIDRAP® SELFIA® wordt formeel afge-raden:

- voor onrustige en zeer onrustige patiënten ;
- voor patiënten die zich uit deze voorziening kunnen wringen of losmaken ;
- voor patiënten die zelf de zijsponden van het bed kunnen ontgrendelen (hangt af van de ernst van de dementie : praxis en gnosis) ;
- voor onrustige patiënten die nadat ze in het SÉCURIDRAP® SELFIA® zijn geïnstalleerd, nog onrustiger worden of bij wie wordt vastgesteld dat zij zich duidelijk niet op hun gemak voelen.

3-BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het SÉCURIDRAP® SELFIA® heeft de vorm van een slaapzak waarvan het bovenste deel is voorzien van een halsuitsnijing en mouwen. De slaapzak is binnenin voorzien van een regelbare bekkensteun om het bekken van de patiënt tijdens diens slaap te ondersteunen.

De slaapzak wordt gebruikt op een ziekenhuisbed en wordt stevig aan het bed van de patiënt bevestigd door middel van **vijf bevestigingspunten** die als volgt zijn aangebracht:

- twee bevestigingspunten ter hoogte van het bekken, aan weerszijden van het SÉCURIDRAP® SELFIA®;
- twee bevestigingspunten ter hoogte van de onderbenen van de patiënt, aan weerszijden van het SÉCURIDRAP® SELFIA®;
- één bevestigingspunt helemaal aan de onderzijde van de slaapzak waarmee tevens de ritssluiting van de slaapzak wordt vergrendeld.

SÉCURIDRAP® SELFIA® wordt met 5 riemen aan het frame van het ziekenhuisbed bevestigd.

SÉCURIDRAP® SELFIA® is verkrijgbaar in vier maten, zodat het altijd aan de lichaamsbouw van de patiënt is aangepast. De maat is aangegeven op het etiket en met de kleurencode aan de halsopening.

De overeenkomsten tussen de maat van het SÉCURIDRAP® SELFIA® en de lichaamsbouw van de patiënt vindt u in **Tabel 1** hierna.

Tabel 1 . Overeenkomst tussen maat en lichaamsbouw

Maat	Lichaamsbouw	Kleurencode
Maat S	Minder dan 55 kg	Donkerblauw
Maat M	Tussen 55 en 75 kg	Groen
Maat L	Tussen 75 en 95 kg	Grijs
Maat XL	Meer dan 95 kg	Hemelsblauw

De perforaties aan weerszijden van de taille zijn voorzien voor het aanbrengen van een onderhuids infuus of een sonde.

Het SÉCURIDRAP® SELFIA® mag ook als een stuk bedden-goed worden gezien en voldoet aan de eisen van de verordening Nr. 2000-164 van 23 januari 2000.

4-GEBRUIKSAANWIJZING

N.B.:

Een demonstratievideo over het gebruik van het SÉCURIDRAP® SELFIA® is beschikbaar op de website: www.mulliez-flory.fr

WAARSCHUWING:

Voor een in een SÉCURIDRAP® SELFIA® geïnstalleerde patiënt moet op regelmatige tijdstippen een nauwgezette controle worden georganiseerd. Alleen verzorgend personeel dat de specifieke veiligheidsregels met betrekking tot het gebruik van het product kent, mag een patiënt in een SÉCURIDRAP® SELFIA® installeren.

4.1 De maat kiezen

Kies de maat van het SÉCURIDRAP® SELFIA® die aangepast is aan de lichaamsbouw van de patiënt in overeenstemming met wat is aangegeven in **Tabel 1**.

WAARSCHUWING :



De keuze van de juiste maat van het SÉCURIDRAP® SELFIA® die is aangepast aan de lichaamsbouw van de patiënt is een essentieel veiligheidspunt. Een niet aan de lichaamsbouw van de patiënt aangepaste maat kan risico's voor de patiënt veroorzaken. (stap 1/6 op het product)

4.2 De patiënt installeren


WAARSCHUWING :

Voor het gebruik van het SÉCURIDRAP® SELFIA® moet telkens worden nagegaan of het SÉCURIDRAP®SELFIA® nog in goede staat is (uitzicht van de stof, naden, riemen, bekkensteun, ritsluitingen) en of de zijsponden van het bed perfect werken.

Plaats het SÉCURIDRAP® SELFIA® op het ziekenhuisbed en lijn de onderzijde van het SÉCURIDRAP® SELFIA® uit met het voeteneinde van de matras.

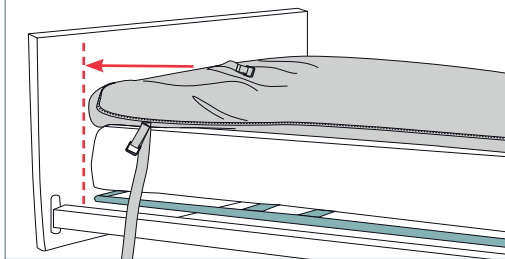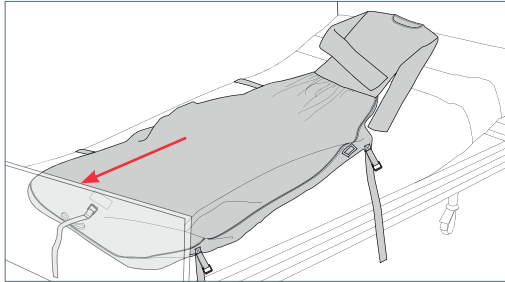


Bevestig de 4 zijriemen aan het binnenframe van het bed (beweegbare deel van een verstelbaar bed) en zorg ervoor dat de matras niet wordt samengedrukt. Begin bij de 2 riemen aan het voeteneinde van het bed en neem vervolgens de 2 riemen ter hoogte van het bekken.

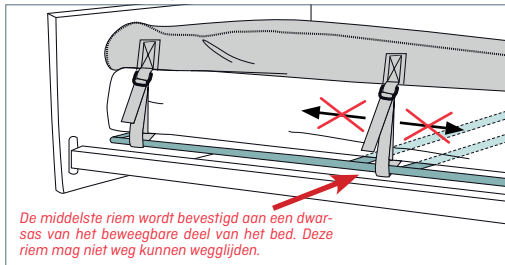

De middelste riem wordt bevestigd aan een dwarsas van het beweegbare deel van het bed. Deze riem mag niet weg kunnen wegglijden.


De riemen bevestigen zonder de matras samen te drukken.

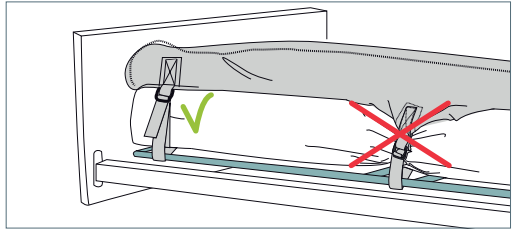

WAARSCHUWING :

De riemen moeten worden bevestigd aan het bewegende en binnenste deel van het bed. De twee riemen ter hoogte van het bekken, moeten worden bevestigd aan een dwarsas of mogen niet kunnen wegglijden. Als niet aan dit veiligheidspunt is voldaan, kan dit risico's inhouden voor de patiënt. (stap 2/6 en 3/6 op het product)


Alvorens de patiënt in het SÉCURIDRAP® SELFIA® te installeren dient de slaapzak vanaf het voeteneind tot de mouwen worden geopend waarbij het bovenlaken naar het hoofdeinde wordt verplaatst zodat de opening van de halssuitsnijing vrijkomt. Open de bekkensteun en leg die plat op het onderlaken van het SÉCURIDRAP® SELFIA®.

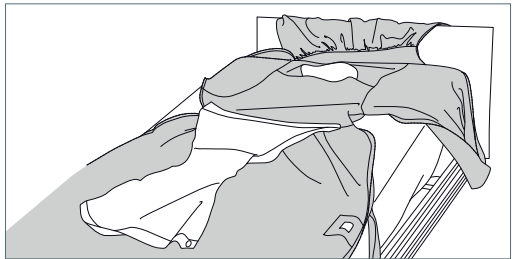

Plaats de patiënt op het SÉCURIDRAP® SELFIA® precies in het midden van de bekkensteun, laat haar/hem neer gaan liggen en let erop dat het hoofd voor de opening van de halssuitsnijing ligt.




Stek de vrije pand tussen de benen van de patiënt en sluit de bekkensteun. De pand moet naar de taille van de patiënt worden gebracht en de knopen moeten in de knoopsgaten op de elastische banden worden vastgemaakt.

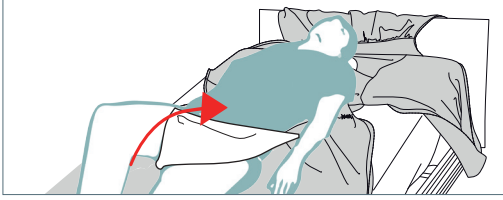


WAARSCHUWING :

De bekkensteun moet correct worden bevestigd en geregeld om te voorkomen dat de patiënt in de slaapzak kan wegschuiven. Als niet aan dit veiligheidspunt wordt voldaan, kunnen risico's voor de patiënt worden veroorzaakt. *[stap 4/6 op het product]*

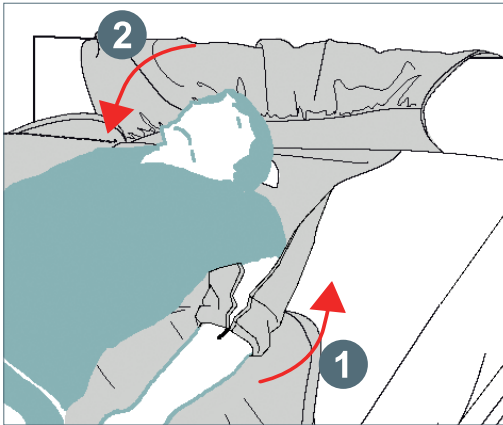

1 - Stop de armen van de patiënt in de mouwen en trek de mouwen op maar sluit die nog niet.

2 - Klap het bovenste deel van het SÉCURIDRAP® SELFIA® terug om de patiënt met zijn/haar hoofd in de slaapzak te stoppen. Plaats hierbij een hand op het voorhoofd van de patiënt om hem/haar bij die beweging te begeleiden en om de halsopening makkelijker over het hoofd van de patiënt te laten glijden.

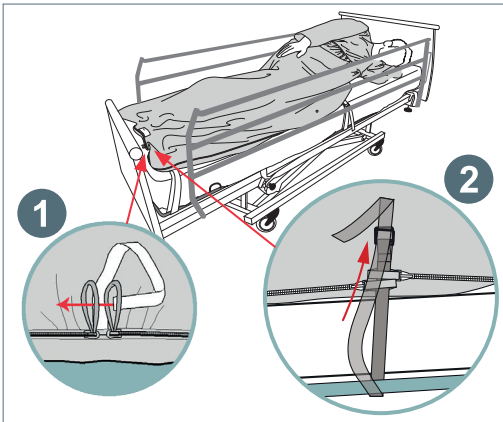

Sluit het SÉCURIDRAP® SELFIA® met de ritssluitingen tot helemaal onderaan.

Na volledige sluiting van de rits, steekt u de riem aan het voeteneind van de slaapzak door de wee lussen van de ritssluiting en bevestigt u de riem aan het beweegbare en binnenste deel van het bed.


WAARSCHUWING :

De riem aan het voeteneind van de slaapzak moet aan het beweegbare en binnenste deel van het bed worden vastgemaakt. Als niet aan dit veiligheidspunt is voldaan, kan de patiënt risico lopen, zelfs het risico dat hij/zij overlijdt. *[stap 5/6 op het product]*

Sla het laken, het deken of dekbed om.

Til de twee zijsponden van het bed op en controleer of die nog goed werken en vergrendeld zijn.

Zet het bed in de laagste stand.

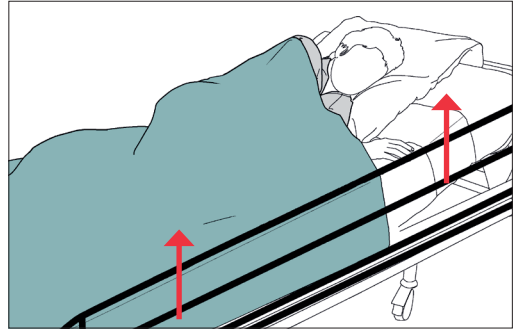

WAARSCHUWING :

Het SÉCURIDRAP® SELFIA® is bedoeld om te worden gebruikt ter aanvulling van de zijsponden. Wij raden het gebruik aan van zijsponden met een vergrendelsysteem aan het voeteneind, buiten het bereik van de patiënt. De zijsponden moeten zijn opgeklapt. Halve zijsponden zijn uit den boze. Het bed moet in de laagste stand staan. Als niet aan dit veiligheidspunt wordt voldaan, kan de patiënt risico lopen, zelfs het risico dat hij/zij overlijdt. *[stap 6/6 op het product]*

Tijdens de nacht moet door het verplegend personeel een regelmatige en nauwgezette bewaking worden georganiseerd.

Bij verschoning of andere verzorging tijdens de nacht, moeten de veiligheidsregels eveneens in acht worden genomen :

- na het verschonen moet de bekkensteun opnieuw worden aangebracht
- de ritssluiting moet worden geborgd door middel van de riem aan het voeteneind van de slaapzak
- de zijsponde(n) moet(en) opnieuw omhoog worden geklapt
- het bed moet opnieuw in de laagste stand worden geplaatst.

Aan het eind van de nacht moet, nadat het SÉCURIDRAP® SELFIA® is uitgetrokken, de goede staat van het product worden gecontroleerd voordat het naar de wasserij wordt gezonden.

5-COMPLICATIES

Alles bij elkaar is er voor het SECURIDRAP® SELFIA®, als bij het gebruik rekening wordt gehouden met de in deze handleiding opgenomen indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen, nog geen melding gemaakt van enige complicaties met betrekking tot het gebruik van het SECURIDRAP® SELFIA®.

Wij willen er hier wel aan herinneren dat het gebruik van het SECURIDRAP® SELFIA® voor sommige patiënten aanleiding kan geven tot onrustig gedrag en tot een gevoel van onbehagen. In dit geval moet voor het welzijn en de veiligheid van de patiënt een ander soort immobilisatiemateriaal worden gebruikt, dat beter aan de situatie is aangepast.

Ten slotte even herhalen dat bij niet-naleving van de in deze handleiding uiteengezette indicaties, contra-indicaties en waarschuwing er een ernstig risico kan ontstaan voor de gezondheid van de patiënt tot zelfs het risico dat de patiënt overlijdt.

6-ONDERHOUD VAN HET SÉCURIDRAP® SELFIA®

Voor het onderhoud van het SÉCURIDRAP® SELFIA® moet het volgende worden uitgevoerd :

- de ritssluitingen moeten volledig worden gesloten.

De inlichtingen betreffende de onderhoudsvoorwaarden zijn de volgende:

- is bestand tegen chloor.
- wassen tot 85 °C.
- met druk kalanderen en uitwringen verboden.
- uitsluitend in de droogzwierder drogen.
- strijken is overbodig.

7-GARANTIE






Op het product geldt een garantie van drie (3) maanden. Als zich ondanks alle zorg die wordt besteed aan de productie van het SÉCURIDRAP® SELFIA®, toch enig defect zou voordoen, dan zal de fabrikant het product repareren of vervangen.

De garantie vervalt wanneer de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden niet worden nageleefd evenals wanneer een niet door de fabrikant erkende persoon enige reparatie of wijziging aan het product heeft uitgevoerd.

Mulliez Flory

Route de St Aubin
49710 Le Longeron, France
Tel.: +33 (0)2.41.63.78.10
Fax: +33 (0)2.41.46.60.19
Email : contact@selfia.com

8-SYMBOLLEN

				
Fabrikant	Productie-datum	Referentie	Reeks-nummer	Voorzorg-maatregelen, zie de bijgevoegde documentatie

9-REFERENTIES

Referentie	Maat	Beschrijving
036547W01B0	S	SÉCURIDRAP® SELFIA® wit maat S
036547W01B0	M	SÉCURIDRAP® SELFIA® wit maat M
036547W01B0	L	SÉCURIDRAP® SELFIA® wit maat L
036547W01B0	XL	SÉCURIDRAP® SELFIA® wit maat XL
036547B01B0	S	SÉCURIDRAP® SELFIA®blauw maat S
036547B01B0	M	SÉCURIDRAP® SELFIA® blauw maat M
036547B01B0	L	SÉCURIDRAP® SELFIA® blauw maat L
036547B01B0	XL	SÉCURIDRAP® SELFIA® blauw maat XL



MULLIEZ-FLORY
SANTÉ

Demonstratievideo
beschikbaar op de website:
www.mulliez-flory.fr

